


# Ist das Herz Ihrer Praxis noch in Form?

Gerätecheck – Wir helfen Ihnen den Werterhalt Ihrer Praxissysteme zu gewährleisten

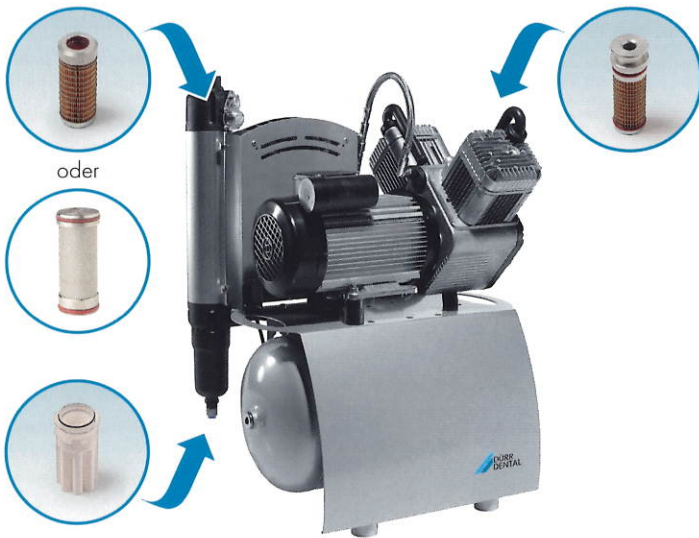

## WAS STEHT AN?

- Jährlicher Filterwechsel**  
Für den Werterhalt Ihres Kompressors. Zugesezte Filter reduzieren die Leistung und Lebensdauer Ihres Kompressors.
- Druckbehälterprüfung**  
Wie der TÜV bei Ihrem Auto muss auch der Kompressor mit seinen Komponenten regelmäßig geprüft werden. Mögliche Vorschäden können vorzeitig erkannt werden und ggf. einfach behoben werden. Die Prüfung ist gemäß BetrSichV § 15 notwendig. Dürr Dental empfiehlt eine Druckbehälterprüfung **alle 5 Jahre**.
- Membrantrocknungsanlage?**  
Mit der Membrantrocknungsanlage ist eine Versorgung mit trockener und hygenischer Druckluft im Dauerbetrieb sichergestellt.
- Erfüllt Ihre Anlage noch die aktuellen Anforderungen?**  
Allgemeiner Check: Zustand und Leistungsvermögen der Druckluftversorgung, Tankvolumen, Anzahl Aggregate, Einschaltdauer.

## WAS STEHT AN?

- Reinigung und Desinfektion**  
Regelmäßige Desinfektion mit Orotol® plus und Reinigung mit MD 555 Cleaner schützen Ihre Saugmaschine und unterstützen den Werterhalt.
- Einwegfilterwechsel**  
**Wöchentlich** den Filter in der Schlauchablage tauschen.
- Reinigung Grobpartikelfilter**  
Um weiterhin eine hohe Saugleistung zu gewährleisten sollte der Grobpartikelfilter der Saugmaschine **vierteljährlich** gereinigt werden.
- Rückschlagventil prüfen**  
**Jährlich** sollte das Rückschlagventil der Saugmaschine am Ausgang der Separierung geprüft und ggf. ausgetauscht werden, um eine volle Performance der Saugmaschine zu gewährleisten.
- Abluftbakterienfilterwechsel**  
Eine mikrobielle Kontamination der Abluft der Saugmaschine kann nicht ausgeschlossen werden. Dürr Dental empfiehlt daher die Abluft der Saugmaschine über einen Abluftbakterienfilter ins Freie zu führen. So schützen Sie Andere durch die Reinhaltung der Umgebungsluft. Der Abluftbakterienfilter muss **alle 2 Jahre** getauscht werden um einen Rückstau der Abluft zu verhindern.
- Unterdruck-Check am Saugsystem**  
Prüfen Sie die Leistung der Saugmaschine mit einer Unterdruckmessung an der Kanüle (Messgerät Best. Nr. 0700-060-51).

# Rückantwort

Freecall Fax: 0261/927 50 40

E-Mail: [info@bk-dental.de](mailto:info@bk-dental.de)

Bitte rufen Sie mich unter folgender Telefonnummer zurück: .....

Frau  Herr

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Praxisname

KOMPRESSOR

SAUGANLAGE

Typ:

Typ:

Seriennummer:

Seriennummer:



Bruns + Klein Dentalfachhandel GmbH  
Im Metternicher Feld 5 - 7  
56072 Koblenz  
Fon - 0261-927500  
Fax - 0261-9275040  
[info@bk-dental.de](mailto:info@bk-dental.de)

